

Waschanleitung



Wieso Sie genau hinsehen sollten:

Vermeintliche Kleinigkeiten können einen großen Unterschied machen. Bitte lesen Sie sich die Hinweise zur Reinigung deswegen genau durch.



Allgemein

- Wechseln Sie die Filtermaske bei Durchfeuchtung
- Bitte verwenden Sie Ihre Filtermaske nur für sich selbst

**DIE GANZE WELT
DER FILTER**

Vor und während der Reinigung

- Verwendung eines geeigneten Waschbeutels
- Bitte bei 40° waschen => MAXIMAL 60°
- Niedrigen Schleudergang verwenden (Schonwaschgang) => MAXIMAL 600 Touren
- Zur Reinigung kann herkömmliches Waschmittel (ohne Bleichmittel) verwendet werden ggf. ergänzt durch handelsüblichen Hygiene-spüler gegen Viren
- Keine Weichspüler, Desinfektionsmittel oder Lösungsmittel wie Aceton, Benzin oder Alkohol verwenden, da dies die Funktionalität der Filtermaske negativ beeinflussen kann
- Filtermasken an der Luft trocknen lassen, am besten im Sonnenlicht
- Nicht in den Trockner geben!
- Nach dem Wasch- und Trockenvorgang sowie vor jeder Verwendung der Maske, muss diese einer Sichtprüfung unterzogen werden: Es dürfen keine sichtbaren Beschädigungen erkennbar sein! Die Gummibänder müssen fest angebracht und dehnbar sein. Der Nasenclip muss biegsam und fest vernäht sein, auch darf kein Draht aus dem Clip abstehen
- Nur Filtermasken wiederverwenden, die in einwandfreiem Zustand sind

Bitte beachten: Durch mehrfaches Waschen kann die Filterleistung beeinträchtigt werden. Diese Angaben sind Empfehlungen und können abweichen.



Verwendung eines geeigneten Beutels



Waschen bei 40°
(max. 60°)



Nicht in den Trockner geben!